



1. Pese ja desinfioi kädet huolellisesti ennen käyttöä.
2. Aseta kasvomaski kuminauhojen avulla.
- 3.-4. Muotoile maskin yläosassa sijaitseva nenäpinne nenävarren päälle huolellisesti ja vedä maskin alaosa leuan alle.
5. Kasvomaski on kertakäyttöinen. Hävitä maski kotitalousjätteen mukana.
6. Pese ja desinfioi kädet heti käytön jälkeen.

Maskien suodatustehokkuus on sama, riippumatta kumpi maskin puoli asetetaan kasvoja vasten.