



# BRUKSANVISNING

1. Tvätta och desinficera händerna noggrant före användning. Kontrollera att produkten är intakt och att produktens sista användningsdatum inte har gått ut.
2. Lägg på näs- och munskydd med hjälp av gummibandet. Rör inte i själva skyddet.
- 3.-4. Forma näsklämman i skyddets övre kant noggrant över näsryggen och dra skyddets nedre kant under hakan.
5. Använd näs- och munskydd kontinuerligt. Ta inte bort det tillfälligt under bruk. Byt till ett nytt skydd, om du måste avlägsna det eller om det skadas.
6. Rör inte skyddets utsida. Använd skyddet så att det täcker näsa och mun under hela användningen. Dra aldrig ner det så att det tex. hänger runt nacken.
7. Tvätta och desinficera händerna före avlägsnande av näs- och munskydd. Avlägsna skyddet med hjälp av gummibandet.
8. Näs- och munskydd är för engångsbruk. Kassera skyddet enligt arbetsplatsens anvisningar genast efter användning. Tvätta och desinficera händerna igen efter detta.