



KÄYTTÖOHJE

1. Pese ja desinfioi kädet huolellisesti ennen käyttöä. Tarkasta, että tuote on ehjä ja että tuotteen viimeinen käyttöpäivämäärä ei ole umpeutunut.
2. Aseta suu-nenäsuojain kuminauhon avulla. Älä koske suojaimen pintaan.
- 3.-4. Muotoile suojaimen yläosassa sijaitseva nenäpidike nenävarren päälle huolellisesti ja vedä suojaimen alaosa leuan alle.
5. Käytä suojainta yhtäjaksoisesti. Älä poista sitä tilapäisesti kasvoilta käytön aikana. Vaihda suu-nenäsuojain uuteen, jos joudut poistamaan sen kasvoilta tai se vaurioituu.
6. Älä koske suojaimen ulkopintaan. Käytä suu- nenäsuojainta niin, että se peittää nenän ja suun koko käytön aikana. Älä laske sitä milloinkaan esim. kaulalle roikkumaan.
7. Pese ja desinfioi kädet ennen suu- nenäsuojaimen poistamista kasvoilta. Poista suojain kuminauhon avulla.
8. Suu-nenäsuojain on kertakäyttöinen. Hävitä suojain työpaikan käytännön mukaisesti heti käytön jälkeen. Pese ja desinfioi kädet uudestaan tämän jälkeen.