




**NeSu**<sup>®</sup>  
**PROFESSIONAL**  
UltraSoft -face mask

KERTAKÄYTTÖINEN SUU-NENÄSUOJAIN  
LÄÄKETIETEELLISEEN KÄYTTÖÖN  
EN 14683:2019 + AC:2019 | Type II  
Malli UL90-TII | Sopii aikuisille

**Valmistaja:**  
Filterpak Oy Ab Ltd  
Hangonkyläntie 67 10900 Hanko Finland  
www.filterpak.fi | www.nesu.fi

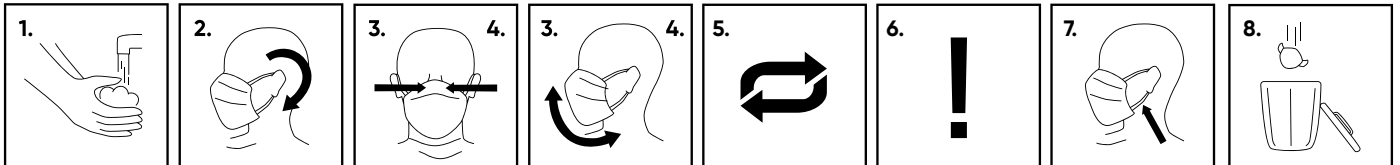

Päiväys / Datum / Date: 22.10.2020

## KÄYTTÖOHJE

1. Pese ja desinfioi kädet huolellisesti ennen käyttöä. Tarkasta, että tuote on ehjä ja että tuotteen viimeinen käyttöpäivämäärä ei ole umpeutunut.
2. Aseta suu-nenäsuojain kuminauhojen avulla. Älä koske suojaimen pintaan.
- 3.-4. Muotoile suojaimen yläosassa sijaitseva nenäpidike nenävarren päälle huolellisesti ja vedä suojaimen alaosa leuan alle.
5. Käytä suojainta yhtäjaksoisesti. Älä poista sitä tilapäisesti kasvoilta käytön aikana. Vaihda suu-nenäsuojain uuteen, jos joudut poistamaan sen kasvoilta tai se vaurioituu.
6. Älä koske suojaimen ulkopintaan. Käytä suu-nenäsuojainta niin, että se peittää nenän ja suun koko käytön aikana.
7. Pese ja desinfioi kädet ennen suu-nenäsuojaimen poistamista kasvoilta. Poista suojain kuminauhojen avulla.
8. Suu-nenäsuojain on kertakäyttöinen. Hävitä suojain työpaikan käytännön mukaisesti heti käytön jälkeen. Pese ja desinfioi kädet uudestaan tämän jälkeen.

**HUOM!** Tuotteen oikea käyttö kaikissa käytön vaiheissa on tärkeää. Jos ohjeita ei noudateta, tuotteen käyttäjä voi altistua tuotteen käyttötilanteessa esiintyvälle terveysvaaralle. Jos käytät suu-nenäsuojaimen kanssa muita suojaimia, varmista, etteivät yhtä aikaa käytettävät tuotteet haittaa toistensa turvallista toimintaa. Älä käytä tuotetta, jos sen viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut. Suu-nenäsuojaimen ei saa koskea käytön aikana. Suu-nenäsuojain on tarkoitettu kertakäyttöiseksi. Ei saa pestä eikä käyttää tuotetta uudelleen! Suu-nenäsuojaimen tai sen materiaalin ei tiedetä aiheuttavan ärsytystä tai haittaa käyttäjälleen. Konsultoi lääkäriä ennen suu-nenäsuojaimen käyttöä jos sinulla on keuhkosairaus tai muita hengitysvaikeuksia. Tuote ei ole henkilönsuojain eikä hengityksensuojain. Tuote ei ole testattu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Tuotteen syttyvyyttä ei ole testattu. Sitä ei saa käyttää avoliekkien läheisyydessä.

Säilytä suu-nenäsuojaimet hygieenisesti kuivassa tilassa, jonka lämpötila on välillä +5 - +45 C ja suhteellinen kosteus alle 80 %.

**Materiaaliluotto:** Polypropeeni, akryyli, elastaani, nailon, polyeteeni, rautalanka

